

Il Doppler Fetale UnbornHeart™ e la sua App mobile – Guida rapida

Installa l'app gratuita (per iPhone, iPad e la maggior parte dei telefoni e tablet Android). Puoi trovare l'App nell'Apple App Store e su Google Play o scaricare il link da www.unbornheart.com.



Installa le batterie. Installa i protettori delle cuffie. Connetti le cuffie al doppler per poi indossarle.



Connetti il cavo smartphone al Doppler nell'apposito ingresso. Connetti il jack audio del cavo allo smartphone nell'apposito ingresso.



Imposta il tuo dispositivo mobile in modalità aereo. Lancia l'app di UnbornHeart. Applica del gel ultrasuoni quanto basta sulla pancia nuda. Accendi il doppler e sarai pronta per monitorare il tuo bambino. Trovi ulteriori informazioni sul manuale utente e nella sezione "Aiuto" che trovi nell'app.

Dopo l'utilizzo: spegni il Doppler e ripulisci il gel ultrasuoni con un panno morbido.

Il Doppler Fetale UnbornHeart è un dispositivo certificato CE con EU MDD IIa e con la II classe FDA secondo la classificazione dei dispositivi medici. I prodotti UnbornHeart non sono fatti per sostituire il consulto di un medico professionista o una sua diagnosi. Se hai qualche preoccupazione per la salute del tuo feto, consulta il tuo medico o la tua ostetrica. UnbornHeart Fetal Doppler ha un anno di garanzia.

Trova maggiori informazioni e FAQ sul sito www.unbornheart.com