

Doppler foetal et application mobile UnbornHeart™ - guide rapide

Installez l'application gratuite (iPhone, iPad, la plupart des téléphones et tablettes Android). Vous pouvez obtenir l'application sur l'App Store d'Apple et sur Google Play via les liens de téléchargement de www.unbornheart.com.



Installez les piles. Installez les coussinets pour écouteurs. Branchez les écouteurs au doppler et portez les écouteurs.



Connectez l'extrémité « DOPPLER » du câble du smartphone au doppler. Connectez l'extrémité « PHONE » du câble à la prise d'entrée audio de votre appareil mobile.



Activez le Mode avion de votre appareil mobile. Démarrez l'application UnbornHeart. Appliquez une quantité suffisante de gel à ultrasons sur votre ventre nu. Allumez le doppler, vous êtes alors prêt à effectuer le monitoring de votre bébé. Trouver plus d'informations dans le manuel de l'utilisateur et la section « Aide » de l'application.

Après utilisation : éteignez le doppler et essuyez le gel à ultrasons du doppler avec un tissu doux. Le doppler foetal UnbornHeart est un appareil conforme aux normes CE avec des classifications de dispositif médical EU MDD IIa et FDA classe II. Les produits UnbornHeart ne visent pas à se substituer à un avis ou diagnostic médical professionnel. Si vous avez des questions concernant la santé de votre fœtus, consultez votre médecin ou votre sage-femme. Le doppler foetal UnbornHeart possède une garantie d'un an.

Trouver plus d'informations et les questions fréquemment posées sur www.unbornheart.com