

UnbornHeart™ Aplicación móvil de un Doppler fetal – Guía rápida

Instalar la aplicación gratuita (iPhone, iPad, la mayoría de móviles Android y tabletas). Puede encontrarla en el App Store y en los enlaces de descarga de Google Play desde www.unbornheart.com.



Instale las baterías. Instale la funda de los auriculares. Conecte los auriculares al Doppler y póngaselos.



Conecte el extremo del cable de teléfono inteligente 'DOPPLER' al Doppler. Conecte el cable 'PHONE' a la salida de audio del móvil.



Ponga su móvil en modo vuelo. Inicie la aplicación UnbornHeart. Aplique bastante gel ecográfico en el vientre. Encienda el Doppler y ya está preparada para sentir a su bebé. Encontrará más información en el manual de usuario y en la 'ayuda' de la aplicación.

Después de usar: Apague el Doppler y limpie el Doppler de todo el gel de la ecografía con un pañuelo de papel suave.

El Doppler fetal UnbornHeart es un dispositivo con el certificado CE y cuenta con la clasificación EU MDD IIa y FDA clase II de dispositivos médicos. Los productos UnbornHeart no se han creado para substituir el consejo del profesional médico o su diagnóstico. Si tiene alguna inquietud respecto a la salud de su feto, consulte con su médico o matrona.

El Doppler fetas UnbornHeart tiene un año de garantía.

Encontrará más información y las preguntas más frecuentes en www.unbornheart.com