

## UnbornHeart™ Fetal Doppler en mobiele app – Korte gids

Installeer de gratis app (iPhone, iPad en Android telefoons en tablets). Je vindt de app bij de App Store van Apple en Google Play via de download-koppelingen bij [www.unbornheart.com](http://www.unbornheart.com).



Monteer de batterijen. Monteer de oorkussentjes van de hoofdset. Verbind de hoofdset met de Doppler en zet de hoofdset op.



Verbind het DOPPLER-uiteinde van de kabel van de smartphone aan de Doppler. Verbind het PHONE-uiteinde van de kabel met de audioconnector van je mobiele toestel.



Stel je mobiele toestel in op vliegtuigmodus. Start de toepassing UnbornHeart. Breng voldoende ultrageluidsgel op je blote buik aan. Zet de Doppler aan, dan is alles gereed om je baby op te nemen. Meer informatie in de gebruikersgids en via de ingebouwde assistentie van de app.

Na het gebruik: Schakel de Doppler uit en veeg de ultrageluidsgel op de Doppler af met een zachte doek.

UnbornHeart Fetal Doppler is een door de CE gecertificeerd toestel met de classificeringen EU MDD Ila en FDA klasse II voor medische apparaten. De producten van UnbornHeart zijn niet bedoeld als vervanging van beroepsmatig medisch advies of een medische diagnose. Als je bedenkingen hebt over de gezondheid van je foetus, raadpleeg dan je arts of vroedvrouw.

UnbornHeart Fetal Doppler biedt een garantie van een jaar.

Meer informatie en veel gestelde vragen bij [www.unbornheart.com](http://www.unbornheart.com)