

UnbornHeart™ Kotidoppler -sovellus – pikaohje vauvan sydäntäänien tallentamiseen

Asenna ilmainen sovellus mobiililaitteeseesi (iPhone, iPad, useimmat Android-puhelimet ja tabletit). Löydät Apple App Store ja Google Play sovelluskaupan latauslinkit osoitteesta www.unbornheart.fi.



Asenna paristot doppleriin. Asenna pehmusteet kuulokkeisiin. Kytke kuulokkeet doppleriin. Laita kuulokkeet korviisi.



Kytke tallennuskaapelin 'DOPPLER' pää doppleriin. Kytke kaapelin 'PHONE' pää mobiililaitteen kuulokeliitäntään.



Aseta mobiililaitte lentotilaan. Käynnistä sovellus. Annostele riittävästi ultraäänigeeliä paljaalle vatsallesi. Käynnistä doppler. Olet valmis aloittamaan vauvan sydäntäänien kuuntelemisen dopplerilla ja tallentamisen mobiilisovelluksella. Lisäohjeita sovelluksen käytöstä löydät sovelluksen 'help'-osiosta.

Käytön jälkeen: sammuta doppler ja pyyhi ultraäänigeeli laitteesta pehmeällä liinalla. Irrota tallennuskaapeli dopplerista ja mobiililaitteesta. Aseta mobiililaitte pois lentotilasta.

UnbornHeart™-sovellus tekee vauvan sydämen sykkeen kuuntelusta viihdyttävän ja sosiaalisen kokemuksen mahdollistamalla sydäntäänien tallentamisen ja jakamisen perheen ja ystävien kanssa. Voit jakaa tallennettuja sydäntäänäni sähköpostilla, tekstiviestinä, Facebookissa ja Twitterissä. Sovellusta ei ole tarkoitettu lääkinälliseen käyttöön vaan ainoastaan viihdekäyttöön.