

UnbornHeart™ fötaler Doppler und Handy-App – Schnellanleitung

Installieren Sie die kostenlose App (iPhone, iPad, die meisten Android-Handys und Tablets). Sie finden die App im Apple App Store und die Download-Links für Google Play auf www.unbornheart.com.



1. Batterien einlegen. 2. Ohrpolster an Ohrhörer anbringen. 3. Ohrhörer an Doppler anschließen und Ohrhörer einlegen.



4. ‚DOPPLER‘-Ende des Smartphone-Kabels an Doppler anschließen. 5. ‚PHONE‘-Ende an Audio-Anschluss Ihres Handys anschließen.



6. Flugmodus Ihres Geräts aktivieren 7. UnbornHeart-App starten und Ultraschall-Gel auftragen. 8. Doppler einschalten – Sie sind nun bereit für die Überwachung Ihres Babys. Weitere Informationen in der Bedienungsanleitung und im ‚Hilfe‘-Bereich der App.

Nach der Benutzung: Schalten Sie den Doppler aus und wischen Sie das Ultraschall-Gel mit einem weichen Tuch vom Doppler ab.

UnbornHeart fötaler Doppler ist ein CE-zertifiziertes Gerät mit EU MDII und FDA Klasse II Klassifizierungen als medizinisches Gerät. UnbornHeart-Produkte sind nicht als Ersatz professioneller medizinischer Beratung oder Untersuchung geeignet. Falls Sie über die Gesundheit Ihres Babies besorgt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Hebamme.

Der fötale Doppler von UnbornHeart verfügt über eine einjährige Garantie.

Finden Sie weitere Informationen und häufige Fragen auf www.unbornheart.com