

Vaisiaus Doplerio Aplikacija (UnbornHeart Fetal Doppler)

Trumpas vadovas kaip įrašyti vaisiaus širdies plakimą

Įdiegti nemokamą programą (iPhone, iPad, Android telefonai ir „tabletės“). Ją galite rasti App Store ir Google Play.



Įdėkite baterijas. Įdėkite ausinių pagalvėles. Prijunkite ausines prie Doplerio.



Prijunkite įrašymo kabelį prie Doplerio, o kitą kabelio galą - prie jūsų mobiliojo prietaiso garso lizdo.



Perjungti savo mobilųjį prietaisą į lėktuvo režimą. Įjunkite programą („apsą“). Užtepkite pakankamai gelio ant pilvuko. Įjunkite Doplerį ir jūs galite jau pradėti stebėti savo kūdikio širdies dūžius ir įrašyti širdies plakimą su programa. Daugiau informacijos apie programą galite rasti programos „built-in help“ meniu.

Po naudojimo: išjunkite doplerį ir nuvalyti želė nuo išjungto Doplerio su minkštu audiniu. Atjunkite įrašymo kabelį nuo Doplerio ir mobiliojo prietaiso. Perjungti savo mobiliojo prietaiso atgal į įprastą režimą.

Ši programa leidžia klausytis jūsų kūdikio širdies plakimas, užfiksuotą vaisiaus širdies garsą galite dalintis su savo artimaisiais. Pastaba: tiek Dopleris tiek ši programa nėra medicininis įrenginys, kuris skirtas medicinos tikslais. Jis skirtas jūsų džiaugsmui įrašyti neužmirštamą jūsų brangiausio pasaulyje stebuklo širdies plakimą.